



ОГБУСО БДИ



ДМРЦ «Росток надежды»



**ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
ДЕТЕЙ** находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

Инструкция по применению Сиденье для ванны детской

Инструкция производителя:



Поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ

☎ 8 (3953) 30-28-16

☎ 8 902 179 01 78 (зав. ОДП Надежда Сергеевна)

☎ 8 924 822 04 14 (рук. ДМРЦ Наталья Владимировна)

e-mail: bddi.priem@mail.ru

Вконтакте: https://vk.com/dmrc_rostok_bratsk

Сиденье для ванны предназначено для купания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП и детей, проходящих реабилитацию после болезни. Рама конструкции выполнена из алюминиевого сплава с полимерным покрытием. Сиденье и спинка выполнены из специального сетчатого быстросохнущего материала. В комплект входят подголовник и ремни для фиксации положения тела и ног.

Особенности

Гибкая регулировка всей конструкции (передние ножки, задние ножки, спинка, поддержка ног).

Гибкая регулировка ножек (вплоть до горизонтального положения).

Спинка регулируется до горизонтального положения.

Легкая конструкция из алюминиевого сплава с полимерным покрытием.

Быстросъемные аксессуары на липких застежках.

Сетчатый быстросохнущий материал сиденья, спинки и аксессуаров.

Сиденье и спинка легко снимаются и чистятся.

Комплект аксессуаров:

- Подголовник
- Поясной ремень
- Ремни для голеней

Технические характеристики:

Ширина сиденья ($\pm 5\%$)	430 мм
Глубина сиденья ($\pm 5\%$)	350 мм
Высота сиденья от пола ($\pm 5\%$)	150-400 мм
Высота спинки от сиденья ($\pm 5\%$)	600 мм
Длина поддержки для ног ($\pm 5\%$)	295 мм
Общая длина ($\pm 5\%$)	1230 мм
Общая ширина ($\pm 5\%$)	438 мм
Грузоподъемность	70 кг
Вес ($\pm 5\%$)	5,2 кг

Регулировка



Внимание

- Не позволяйте детям играть с изделием
- Берегите пальцы и руки при раскладывании и регулировке изделия.
- Перед использованием изделия убедитесь, что все детали надежно зафиксированы
- Перед использованием изделия отрегулируйте все детали до необходимого положения. Не регулируйте изделие, если пользователь уже находится на нем.

Регулировка спинки



Нажмите и удерживайте кнопки



Регулируйте спинку до необходимого вам положения. Отпустите кнопки, спинка зафиксируется после щелчка.

Регулировка поддержки для ног



Нажмите и удерживайте кнопки




Регулируйте поддержку для ног до необходимого вам положения. Отпустите кнопки, поддержка зафиксируется после щелчка.

Регулировка задней ножки



Нажмите и удерживайте кнопки

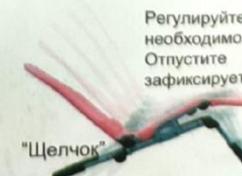

Регулируйте поддержку для ног до необходимого вам положения. Отпустите кнопки, поддержка зафиксируется после щелчка.