

Коммуникатор GoTalk 4+ — простое устройство альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК) для людей с нарушением речи.

Коммуникатор GoTalk 4+ удобно брать с собой и всегда держать под рукой. В нем четыре кнопки-поля для изображений и воспроизведения сообщения по любой тематике, на каждую кнопку можно записать пять сообщений. Над основными кнопками есть две дополнительные, для часто употребляемых слов и фраз. Всего коммуникатор записывает и воспроизводит до 22 сообщений, общая длительность записи — больше 4 минут.

Разные уровни сообщений на основных кнопках можно использовать в разных ситуациях:

- первый уровень — для ежедневных потребностей;
- второй уровень — для общения с друзьями;
- третий уровень — для занятия по математике;
- четвертый уровень — для общения дома;
- пятый уровень — для занятия по любой другой теме.

Коммуникатор GoTalk 4+ оборудован ручкой для переноски, регулятором громкости и специальным отсеком для хранения карточек с изображениями. Карточки не идут в комплекте.

Как работать с GoTalk 4+

Распечатайте карточки с изображениями для общения. Для этого можно использовать программу Boardmaker, в которой уже есть готовые шаблоны под любую модель GoTalk.

Запишите сообщения:

- нажмите кнопку записи на задней панели устройства. Загорится индикатор режима записи;
- нажмите на кнопку с картинкой, для которой вы хотите записать сообщение;
- нажмите на картинку и прослушайте сообщение.

Запишите 10-секундные сообщения на остальные кнопки-изображения. Сообщения остаются в памяти устройства, любое из них можно переписать.

Параметры

- Время записи: в среднем 10 секунд на одно сообщение
- Общее количество сообщений — 22
- Размеры устройства: 30,5 см x 23 см x 3 см
- Размер кнопки-изображения: 7,5 см x 7,5 см
- Батарейки типа AA
- Вес – 652 г

 **Кнопки-коммуникаторы** – средства альтернативной коммуникации, которые обеспечивают дополнительную возможность общения или заменяют вербальную речь. Работа с коммуникативными кнопками стимулирует появление речи у детей, ускоряет ее развитие. У ребенка включается сразу несколько стимулов: аудиальный, словесный и визуальный.

Коммуникативные кнопки необходимы детям со следующими особенностями развития:

- Задержки речевого развития, когда вербальная речь еще отсутствует или же вербальная речь непонятна окружающим.
- Двигательные нарушения, создающие моторные трудности: дизартрия, диспраксия, анартрия, апраксия, ДЦП.
- Сенсорная и моторная алалия на этапе запуска речи.
- Нарушения слуха.
- Специфические органические проблемы артикуляционных органов в структуре генетического заболевания.
- Трудности контакта (аутизм), ограничивающие способность к восприятию слов собеседника, способность выразить мысли с помощью вербальных слов.

- ТМНР (тяжелые множественные нарушения развития).

 На коммуникативную кнопку записывают одно или несколько слов, фразу. Ребенок нажимает кнопку, запись воспроизводится. Кнопкой могут пользоваться даже дети с тяжелыми двигательными нарушениями: можно нажимать на клавишу не только рукой, но и другими частями тела (головой, локтем, ногой).

 Ребенок научится:

- отвечать на вопросы собеседника простыми словами «ДА/НЕТ»;
- приветствовать собеседника и прощаться с ним;
- договаривать сказки, песни, стихи;
- использовать коммуникативные кнопки для общения.

Во время работы с коммуникативными кнопками у ребенка развиваются внимание, мышление, память и сенсорные эталоны, увеличивается словарный запас и коммуникативная функция речи. Использование дополнительных знаков в виде пиктограмм на кнопке способствует развитию абстрактного мышления и символической деятельности.

Успехов Вам в развитии своих детей!



ОГБУСО БДИ



ДМРЦ «Росток надежды»

Коммуникатор GoTalk 4+ Инструкция

Счастье ...
... это умение *радоваться*
простым вещам!



Поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ

☎ 8 (3953) 30-28-16

☎ 8 902 179 01 78 (зав. ОДП Надежда Сергеевна)

☎ 8 924 822 04 14 (рук. ДМРЦ Наталия Владимировна)

e-mail: bddi.priem@mail.ru

Вконтакте: https://vk.com/dmrc_rostok_bratsk